

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### για τα πέλματα ειδικής κατασκευής

#### 1.

Τις πρώτες μέρες, τα πέλματα πρέπει να φοριούνται σταδιακά: **1,5 έως 2 ώρες τις πρώτες 2 ημέρες, 3-4 ώρες τις επόμενες 5 ημέρες, και στη συνέχεια συνεχώς.** Αυτό γίνεται επειδή αλλάζουν οι πιέσεις στα οστά του πέλματος και στο κέντρο βάρους του σώματος και ενδέχεται να προκληθούν ενοχλήσεις.

#### 2.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, υπάρξει **πόνος, φουσκάλα ή κοκκινίλα** στο πόδι κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, **αφαιρέστε αμέσως τα πέλματα και επισκεφθείτε μας.**

#### 3.

Τα πέλματα πλένονται κανονικά με **χλιαρό νερό** και **υγρό σαπούνι**, ενώ **στεγνώνουν σε σκιερό μέρος** (όχι κοντά σε θερμότητα). Είναι φτιαγμένα από **υλικά υποαλλεργικά, αντικραδασμικά και αντιμυκητιακά.** Το δέρμα στα πόδια σας αναπνέει κανονικά.

#### 4.

Τα πέλματά σας έχουν περίπου **ένα έτος διάρκεια ζωής.**

#### 5.

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την εταιρεία μας φέρουν **πιστοποιητικό CE**, εγκεκριμένο από το Ελληνικό κράτος.

#### 6.

Και μην ξεχνάτε... το πέλμα που σας παραδώσαμε είναι **αποκλειστικά για τα δικά σας πόδια!**